

Gebrauchsanweisung

DKL S1 Sattelstuhl

Hersteller:
DKL GmbH
An der Ziegelei 4
D-37124 Rosdorf
(+49) 0551-50060
info@dkl.de
www.neuepolster.de



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Hinweise	2
1.1. Einleitung	2
1.2. Verwendete Symbole	2
1.3. Sicherheitshinweise	2
2. Technische Daten	3
3. Montageanleitung	3
4. Bedienungsanleitung	4
5. Wartungshinweise	5
5.1. Reinigung, Desinfektion und Pflege	5
5.2. Technische Wartung	5
6. Entsorgungshinweise	5

1. Allgemeine Hinweise

1.1. Einleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Sattelstuhl der Firma DKL GmbH entschieden haben. Mit dieser Gebrauchsanweisung möchten wir Ihnen alle wichtigen Informationen für den Gebrauch dieses Sattelstuhls übermitteln.

Dieser DKL- Sattelstuhl wurde als Sitzmöbel konzipiert. Er dient dazu, eine ergonomische und komfortable Sitzposition zu ermöglichen.

WICHTIG! Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf. Sollte die Anleitung nicht auffindbar sein, helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte nennen Sie uns dann die Bezeichnung des Modells, das Sie auf dem Typenschild unter dem Sitzpolster finden.



Bei allen Rückfragen zum erhaltenen Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DKL GmbH, An der Ziegelei 4, D-37124 Rosdorf
Mo. – Do. von 8 bis 17 Uhr: Tel. +49 551 / 5006 202
E-Mail polster@dkl.de

1.2. Verwendete Symbole



WARNUNG! Gefahr von Personenschäden.



WARNUNG! Gefahr von Sachschäden.



Gedruckte oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten.



Entsorgungshinweise / Recycling.

1.3. Sicherheitshinweise




- **WARNUNG!** Beachten Sie zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden alle Sicherheitshinweise der folgenden Anleitung, bevor Sie den Stuhl erstmalig verwenden.
- Nutzen Sie den Sattelstuhl nur als Sitzmöbel.
- Die Einhaltung der nationalen und lokal geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen liegt in der Verantwortung des Anwenders; insbesondere die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Unfallverhütungsmaßnahmen sind zu beachten.
- Beachten Sie die für den Sattelstuhl maximal zulässige Belastbarkeit von 130 kg.
- Stellen Sie stets ein barrierefreies Rollen des Stuhls sicher und vermeiden Sie das Überrollen von Leitungen oder Kabeln, um Sturzgefahr durch Kippen sowie Sachschäden zu verhindern.
- Prüfen Sie den Stuhl vor jeder Nutzung auf sichtbare, sicherheitsrelevante Beschädigungen oder Funktionsstörungen. Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit gefährden könnten, darf der Stuhl nicht verwendet werden.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen an eingewiesenes Fachpersonal oder unseren Kundenservice.
- **WARNUNG!** Verletzungsgefahr durch Hochdruck! Versuchen Sie niemals eine Gasdruckfeder zu öffnen oder zu reparieren.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich DKL-Originalersatzteile verwendet werden.
- Führen Sie die empfohlenen Inspektions- und Wartungsarbeiten regelmäßig durch.
- Prüfen Sie den Stuhl zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft mindestens einmal jährlich auf Schäden, Funktionsstörungen, festen Sitz der Verschraubungen, Verschleiß und Korrosion.
- Nutzen oder lagern Sie den Stuhl nicht im Außenbereich und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Pflege in dieser Anleitung.



2. Technische Daten

Der DKL S1 Sattelstuhl wird in einer hohen Variante (DKLS1H) und in einer tieferen Variante angeboten (DKLS1T).

Hohe Variante DKLS1H	
Sitzhöhe vom Boden niedrigste Position unbelastet	590 mm
Sitzhöhe vom Boden höchste Position unbelastet	770 mm
Sitzfläche (B x T)	420 x 350 mm
Gewicht netto	7,7 kg
Maximal zulässige Belastung	130 kg
Fußkreuz 5-armig	Ø 600 mm

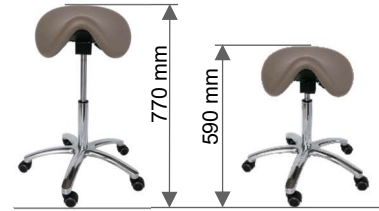

Tiefere Variante DKLS1T	
Sitzhöhe vom Boden niedrigste Position unbelastet	490 mm
Sitzhöhe vom Boden höchste Position unbelastet	610 mm
Sitzfläche (B x T)	420 x 350 mm
Gewicht netto	7,4 kg
Maximal zulässige Belastung	130 kg
Fußkreuz 5-armig	Ø 600 mm

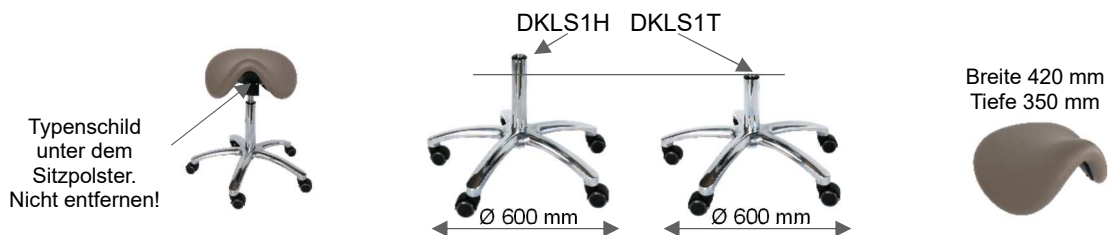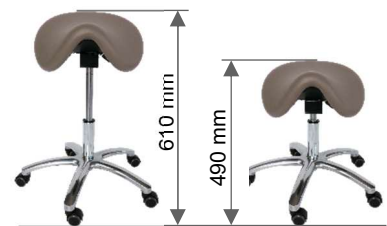

3. Montageanleitung


Die Montageanleitung der DKL S1 Sattelstühle ist für die hohe Variante (DKLS1H) und die tiefere Variante (DKLS1T) identisch.

⚠ VORSICHT! Achten Sie beim Entpacken der Bestandteile darauf, dass Sie die Komponenten nicht durch Schnitte etc. beschädigen.

Die Montage ist unkompliziert und werkzeugfrei.
Der DKL S1 Sattelstuhl besteht aus drei Komponenten, die ineinandergesteckt werden.



- 1) Stellen Sie das Fußkreuz **1** auf den Boden.
- 2) Positionieren Sie die Gasdruckfeder **2** mit dem breiteren Ende in die mittige Öffnung des Fußkreuzes.
- 3) Ziehen Sie die Schutzkappe am oberen Ende der Gasdruckfeder ab.
- 4) Positionieren Sie das Polster **3** des Sattelstuhls mit der mittigen Öffnung unter dem Sattelpolster auf das obere Ende der Gasdruckfeder.
- 5) Drücken Sie das Polster fest auf und setzen Sie sich auf den Sattelstuhl. Belasten Sie den Sattel mehrmals hintereinander mit Ihrem vollen Körpergewicht, damit die Gasdruckfeder fest in der Aufnahme sitzt und sich beim Anheben des Stuhls nicht wieder löst.
- 6) Prüfen Sie alle Einstellungs-Funktionen der Bedienungsanleitung im folgenden Kapitel.

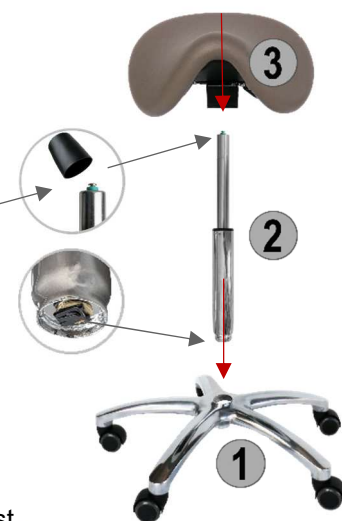

4. Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung der DKL S1 Sattelstühle ist für die hohe Variante (DKLS1H) und die tiefere Variante (DKLS1T) identisch.

Der DKL S1 Sattelstuhl wurde entwickelt, um höchste ergonomische Ansprüche mit maximaler Sicherheit zu vereinen. Jedes Detail dient Ihrem Komfort:

- **Ergonomische Sattelfläche:** Die anatomisch geformte Sattelfläche fördert eine aufrechte, gesunde Sitzhaltung und öffnet den Hüftwinkel. Dies entlastet die Wirbelsäule und sorgt für eine verbesserte Durchblutung der Beine.
- **Individuelle Neigungsverstellung:** Passen Sie den Neigungswinkel der Sattelfläche stufenlos an Ihre Arbeitsweise an. Die optimale Neigung unterstützt die Beckenkipfung nach vorne und verhindert so aktiv einen Rundrücken.
- **Stufenlose Höhenverstellung mit Tiefenfederung:** Stufenlose Höhenverstellung mit Tiefenfederung: Dank der hochwertigen Gasdrucksäule (Klasse 4) lässt sich die Sitzhöhe stufenlos anpassen. Die integrierte Komfort-Tiefenfederung dämpft das Körpergewicht beim Hinsetzen durch eine leichte Absenkung sanft ab und schont so Ihre Wirbelsäule.
- **Sicherheits-Laufrollen:** Die geräuscharmen Doppelrollen sind mit einer lastabhängigen Bremse ausgestattet, die ein ungewolltes Wegrollen beim Aufstehen verhindert. Die leichtläufige PU-Lauflfläche der Universal-Rolle ist für alle harten Bodenbeläge sowie kurzflorige Teppichböden geeignet.
- **Standfestes Aluminium-Fußkreuz:** Das 5-armige Fußkreuz aus Aluminium garantiert eine hohe Kippstabilität und optimale Bewegungsfreiheit.
- **Symmetrisches Design:** Der Stuhl ist komplett symmetrisch aufgebaut und kann daher uneingeschränkt in alle Richtungen ausgerichtet werden.

Für eine ergonomisch optimale Sitzposition, werden zwei Verstellmöglichkeiten angeboten:

Höhenverstellung der Sattelfläche

Die stufenlose Höhenverstellung erfolgt über den Verstellhebel unter dem Sitz (im Sitzen links). Wird der Sitz durch das Körpergewicht belastet, senkt sich der Sitz. Wird der Sitz entlastet, hebt sich der Sitz. Wird der Hebel wieder entlastet, ist die eingestellte Sitzhöhe fixiert.

Neigungsverstellung der Sattelfläche


Die individuelle Neigung des Sattelpolsters erfolgt über den Verstellhebel (im Sitzen rechts). Ziehen Sie den Hebel nach oben. Neigen Sie die Sattelfläche durch leichte Gewichtsverlagerung in die für Sie optimale Position (Einstellbereich ca. 12°). Drücken Sie den Hebel wieder nach unten, um die gewählte Neigung sicher zu blockieren.



5. Wartungshinweise

5.1. Reinigung, Desinfektion und Pflege

- **Reinigung und Pflege der Dentalpolster:** Als Spezialist für Dentalpolster aller Marken hat die DKL GmbH ein umfangreiches Sortiment an Reinigungs- und Pflegemittel im Sortiment, welches auf die Bedürfnisse von Dental-Kunstlederoberflächen abgestimmt ist. Unser Sortiment mit hilfreichen Anwendungsvideos finden Sie unter www.neuepolster.de/Pflege-Desinfektion/.
- **Reinigung der restlichen Oberflächen:** Verwenden Sie zur Reinigung der Metall- und Kunststoffoberflächen DentaClean aus unserem Sortiment. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit scheuernder Wirkung oder Chlor- oder Alkoholreiniger.
- **Desinfektion der Oberflächen:** Verwenden Sie eine alkoholfreie Wischdesinfektion, die für Kunststoffe geeignet ist. Mit dieser Wischdesinfektion können Kunststoffe, Kunstleder und Metallflächen des DKL-Sattelstuhls desinfiziert werden.

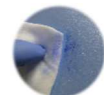

VORSICHT! Im Arbeitsumfeld verwendete Substanzen können dauerhafte Flecken auf Oberflächen verursachen. Entfernen Sie daher sichtbare Verschmutzungen und Flecken immer sofort.



WICHTIG! Prüfen Sie die Laufrollen auf Verschmutzungen auf den Laufflächen und den Achsen und säubern Sie diese nach Bedarf.



ACHTUNG! Kolben der Gasdruckfeder nicht unnötig reinigen (Schmierfilm). Bei Verschmutzung (Staub/Fett) den ausgefahrenen Kolben trocken abwischen. Nur bei starker Verklebung Reinigungsspray (z. B. WD-40) nutzen. Wichtig: Danach stets eine hauchdünne Schicht harzfreies Mehrzweckfett oder Silikonspray auftragen und die Höhenverstellung zum Verteilen mehrmals betätigen.



5.2. Technische Wartung



- Prüfen Sie den Stuhl vor jeder Nutzung auf sichtbare, sicherheitsrelevante Beschädigungen oder Funktionsstörungen. Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit gefährden könnten, darf der Stuhl nicht verwendet werden.
- Prüfen Sie den Stuhl je nach Nutzungsintensität, jedoch mindestens einmal jährlich, gründlich auf sicherheitsrelevante Schäden oder lassen Sie diese Prüfung durch eingewiesenes Fachpersonal durchführen.

Prüfungsbestandteile:

- Prüfen Sie den Stuhl auf sichtbare Beschädigungen, Verschleiß und Korrosion, die die Sicherheit bei der Nutzung gefährden könnten.
 - Überprüfen Sie die Funktion der Gasdruckfeder sowie die Leichtgängigkeit und den sicheren Sitz der Laufrollen.
 - Überprüfen Sie den festen Sitz aller sichtbaren Verschraubungen.
 - Prüfen Sie den schmalen Kolben auf Verschmutzungen (klebriger Film aus Staub/Fett). Dieser kann die Höhenverstellung beeinträchtigen. Zur Reinigung und Pflege siehe Punkt 5.1.
- Wenden Sie sich im Falle einer notwendigen Reparatur an unseren Kundenservice oder an eingewiesenes Fachpersonal.

6. Entsorgungshinweise

VERPACKUNG



Die Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. DKL nimmt in Deutschland am zertifizierten Entsorgungssystem Duales System teil. Bitte führen Sie die Verpackungsmaterialien der getrennten Wertstoffsammlung gemäß den örtlichen Bestimmungen zu.

SATTELSTUHL



Am Ende seiner Lebensdauer darf der Stuhl nicht im Hausmüll entsorgt werden. Da er zu einem großen Anteil aus Metall besteht, sollte er einem zertifizierten Metallverwerter oder Wertstoffhof zugeführt werden.



WARNUNG! Die Gasdruckfeder steht unter hohem Druck. Eine unsachgemäße Demontage oder gewaltsame Öffnung bei der Entsorgung kann zu schweren Verletzungen führen. Überlassen Sie die Entsorgung des Stuhls daher Fachbetrieben oder informieren Sie den Entsorger über die verbaute Gasdruckfeder.