

Mode d'emploi

Siège de travail DKL E1

Fabricant :
DKL GmbH
An der Ziegelei 4
D-37124 Rosdorf
Allemagne
(+49) 0551-50060
info@dkl.de
www.neuepolster.de



SOMMAIRE

1. Remarques générales	2
1.1. Introduction	2
1.2. Symboles utilisés	2
1.3. Consignes de sécurité	2
2. Caractéristiques techniques	3
3. Instructions de montage	3
4. Mode d'emploi	4
5. Consignes de maintenance	5
5.1. Nettoyage, désinfection et entretien	5
5.2. Maintenance technique	5
6. Consignes d'élimination	5

1. Remarques générales

1.1. Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un siège de travail de la société DKL GmbH. Ce mode d'emploi a pour but de vous transmettre toutes les informations importantes pour l'utilisation de ce siège de travail.

Ce siège de travail DKL a été conçu comme un meuble d'assise. Il est destiné à offrir une position assise ergonomique et confortable.

IMPORTANT ! Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main. Si vous ne trouvez plus le manuel, nous vous aiderons volontiers. Veuillez nous indiquer le nom du modèle que vous trouverez sur la plaque signalétique située sous le rembourrage de l'assise.



Nous restons à votre entière disposition pour toute question relative au produit reçu.

DKL GmbH, An der Ziegelei 4, D-37124 Rosdorf, Allemagne
Du lundi au jeudi de 8h à 17h : Tél. +49 551 / 5006 202

E-mail : polster@dkl.de

1.2. Symboles utilisés



AVERTISSEMENT ! Risque de dommages corporels.



AVERTISSEMENT ! Risque de dommages matériels.



Respecter le mode d'emploi imprimé ou électronique.



Consignes d'élimination / Recyclage.

1.3. Consignes de sécurité




- **AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout dommage corporel ou matériel, veuillez respecter toutes les consignes de sécurité du présent manuel avant la première utilisation du siège.
- Utilisez le siège de travail uniquement comme meuble d'assise.
- Le respect des réglementations nationales et locales ainsi que des consignes de sécurité relève de la responsabilité de l'utilisateur ; il convient notamment de respecter les dispositions en vigueur relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi que les mesures de prévention des accidents.
- Respectez la capacité de charge maximale autorisée de 130 kg pour ce siège de travail.
- Assurez-vous toujours que le siège puisse rouler sans obstacle et évitez de rouler sur des câbles ou des fils afin de prévenir tout risque de chute par basculement ainsi que tout dommage matériel.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le siège ne présente pas de dommages visibles ou de dysfonctionnements relevant de la sécurité. En cas de défauts susceptibles de compromettre la sécurité de fonctionnement, le siège ne doit pas être utilisé.
- En cas de dommages ou de dysfonctionnements, adressez-vous à un personnel spécialisé qualifié ou à notre service client.
- **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure par haute pression ! N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer un ressort à gaz.
- Pour les réparations, seules des pièces de rechange d'origine DKL doivent être utilisées.
- Effectuez régulièrement les travaux d'inspection et de maintenance recommandés.
- Afin de garantir la disponibilité opérationnelle, vérifiez le siège au moins une fois par an pour détecter d'éventuels dommages, dysfonctionnements, l'usure, la corrosion ou le desserrage des raccords vissés.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le siège à l'extérieur et protégez-le de l'humidité.
- Respectez les consignes de nettoyage, de désinfection et d'entretien figurant dans ce mode d'emploi.


2. Caractéristiques techniques

Le siège de travail DKL E1 est proposé en une variante haute (DKLE1H) et une variante basse (DKLE1T).

Variante haute DKLE1H	
Hauteur d'assise à partir du sol, position la plus basse (sans charge)	560 mm
Hauteur d'assise à partir du sol, position la plus haute (sans charge)	740 mm
Largeur d'assise	Ø 400 mm
Poids net	8,6 kg
Charge maximale autorisée	130 kg
Piètement à 5 branches	Ø 600 mm

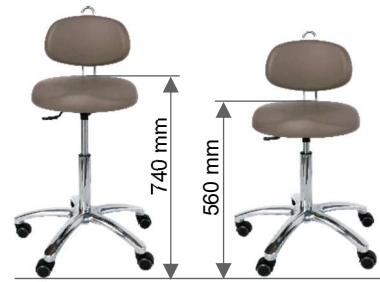

Variante basse DKLE1T	
Hauteur d'assise à partir du sol, position la plus basse (sans charge)	480 mm
Hauteur d'assise à partir du sol, position la plus haute (sans charge)	600 mm
Largeur d'assise	Ø 400 mm
Poids net	8,3 kg
Charge maximale autorisée	130 kg
Piètement à 5 branches	Ø 600 mm

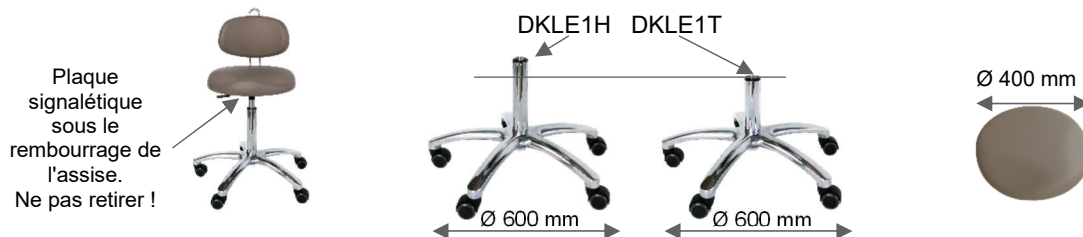

3. Instructions de montage


Les instructions de montage des sièges de travail DKL E1 sont identiques pour la variante haute (DKLE1H) et la variante basse (DKLE1T).

⚠ ATTENTION ! Lors du déballage des composants, veillez à ne pas les endommager (par des coupures, etc.).

Le montage est simple et ne nécessite aucun outil. Le siège de travail DKL E1 se compose de trois éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres.



- 1) Posez le piètement **1** sur le sol.
- 2) Positionnez le ressort à gaz **2** avec l'extrémité la plus large dans l'ouverture centrale du piètement.
- 3) Retirez le capuchon de protection à l'extrémité supérieure du ressort à gaz.
- 4) Positionnez le rembourrage **3** du siège de travail avec l'ouverture centrale située sous le rembourrage de l'assise sur l'extrémité supérieure du ressort à gaz.
- 5) Appuyez fermement sur le rembourrage et asseyez-vous sur le siège-selle. Appliquez plusieurs fois de suite tout le poids de votre corps sur la selle afin que le ressort à gaz soit bien fixé dans son logement et ne se détache pas lors du levage du siège.
- 6) Vérifiez toutes les fonctions de réglage du mode d'emploi au chapitre suivant.

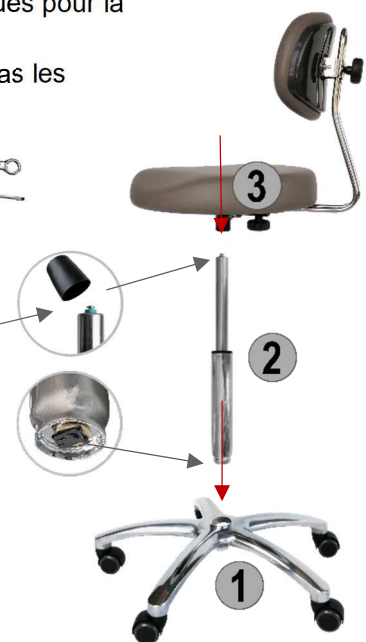

4. Mode d'emploi

Le mode d'emploi des sièges de travail DKL E1 est identique pour la variante haute (DKLE1H) et la variante basse (DKLE1T).

Le siège de travail DKL E1 a été conçu pour allier les exigences ergonomiques les plus élevées à une sécurité maximale. Chaque détail est au service de votre confort :

- **Surface d'assise ergonomique** : La surface d'assise de forme spéciale, avec des évidements intégrés pour les jambes, vous offre un maintien optimal et soulage les cuisses, même lors de traitements prolongés.
- **Dossier ergonomique** : La forme du dossier réglable en hauteur soutient activement votre région lombaire et assure une sensation d'assise agréable.
- **Réglage en hauteur continu avec suspension de profondeur** : Grâce à la colonne de gaz de haute qualité (classe 4), vous ajustez en continu la hauteur de l'assise ainsi que celle du dossier. La suspension de confort intégrée amortit en douceur le poids du corps lors de l'assise par un léger abaissement, protégeant ainsi votre colonne vertébrale.
- **Roulettes de sécurité** : Les roulettes doubles silencieuses sont équipées d'un frein dépendant de la charge, qui empêche le siège de rouler involontairement lorsque vous vous levez. La surface de roulement en PU de la roulette universelle convient à tous les sols durs ainsi qu'aux moquettes à poils courts.
- **Piètement en aluminium stable** : Le piètement à 5 branches en aluminium garantit une grande stabilité et une liberté de mouvement optimale.
- **Design symétrique** : Le siège présente une conception entièrement symétrique, permettant ainsi une orientation sans restriction dans toutes les directions.


Pour une position assise ergonomiquement optimale, deux possibilités de réglage sont proposées :

Réglage en hauteur de la surface d'assise

Le réglage en hauteur continu s'effectue en soulevant le levier de réglage situé sous l'assise. Si l'assise est chargée par le poids du corps, le siège s'abaisse. Si l'assise est déchargée, le siège monte. Lorsque le levier est relâché, la hauteur d'assise réglée est fixée.

Réglage en hauteur du rembourrage du dossier


Le réglage en hauteur continu s'effectue via la vis rotative située derrière le rembourrage du dossier. Desserrez la vis rotative et montez ou descendez le rembourrage pour atteindre une position ergonomique optimale. Enfin, resserrez fermement la vis rotative.

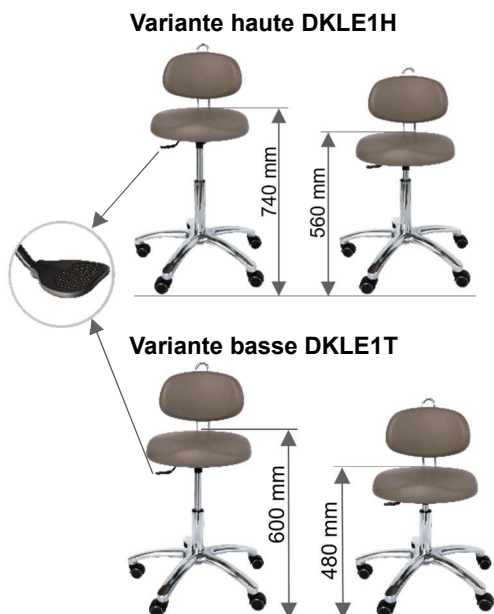

5. Consignes de maintenance

5.1. Nettoyage, désinfection et entretien

- **Nettoyage et entretien des rembourrages dentaires** : En tant que spécialiste des rembourrages dentaires de toutes marques, DKL GmbH propose une vaste gamme de produits de nettoyage et d'entretien adaptés aux besoins des surfaces en similicuir dentaire. Vous trouverez notre gamme ainsi que des vidéos d'application utiles sur <https://neuepolster.de/fr/Entretien-et-nettoyage/>.
- **Nettoyage des autres surfaces** : Pour le nettoyage des surfaces métalliques et plastiques, utilisez DentaClean de notre gamme. N'utilisez pas de produits de nettoyage à effet abrasif, ni de nettoyants à base de chlore ou d'alcool.
- **Désinfection des surfaces** : Utilisez une désinfection par essuyage sans alcool adaptée aux matières plastiques. Cette méthode permet de désinfecter les plastiques, le similicuir et les surfaces métalliques du siège de travail DKL.

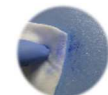

ATTENTION ! Les substances utilisées dans l'environnement de travail peuvent causer des taches permanentes sur les surfaces. Par conséquent, retirez toujours immédiatement les saletés et les taches visibles.



IMPORTANT ! Vérifiez l'absence de saletés sur les surfaces de roulement et les axes des roulettes et nettoyez-les si nécessaire.



ATTENTION ! Ne pas nettoyer inutilement le piston du ressort à gaz (film lubrifiant). En cas de saleté (poussière/graisse), essuyez le piston déployé avec un chiffon sec. N'utilisez un spray de nettoyage (par ex. du WD-40) qu'en cas de fort encrassement collant. Important : appliquez ensuite toujours une fine couche de graisse universelle sans résine ou de spray silicone et actionnez plusieurs fois le réglage en hauteur pour répartir le produit.



5.2. Maintenance technique



- Avant chaque utilisation, vérifiez que le siège ne présente pas de dommages visibles ou de dysfonctionnements relevant de la sécurité. En cas de défauts susceptibles de compromettre la sécurité de fonctionnement, le siège ne doit pas être utilisé.



- Selon l'intensité d'utilisation, mais au moins une fois par an, vérifiez soigneusement le siège pour détecter d'éventuels dommages affectant la sécurité ou faites effectuer ce contrôle par un personnel spécialisé qualifié.

Éléments du contrôle :

- Vérifiez que le siège ne présente pas de dommages visibles, d'usure ou de corrosion susceptibles de compromettre la sécurité lors de l'utilisation.
 - Vérifiez le fonctionnement du ressort à gaz ainsi que la mobilité et la fixation correcte des roulettes.
 - Vérifiez le serrage de tous les raccords vissés visibles.
 - Vérifiez que le piston étroit ne présente pas de saletés (film collant de poussière/graisse). Cela peut entraver le réglage en hauteur. Pour le nettoyage et l'entretien, voir le point 5.1.
- En cas de réparation nécessaire, contactez notre service client ou un personnel spécialisé qualifié.

6. Consignes d'élimination

EMBALLAGE : L'emballage est composé de matériaux recyclables. Veuillez l'acheminer vers la collecte sélective des matériaux recyclables conformément aux réglementations locales.



SIÈGE TRAVAIL : À la fin de sa durée de vie, le siège ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Comme il est composé en grande partie de métal, il doit être confié à un recycleur de métaux certifié ou à une déchetterie.



AVERTISSEMENT ! Le ressort à gaz est sous haute pression. Un démontage inapproprié ou une ouverture forcée lors de l'élimination peut entraîner des blessures graves. Confiez donc l'élimination du siège à des entreprises spécialisées ou informez l'entreprise d'élimination de la présence du ressort à gaz.